



Gebrauchsanweisung

Produktname: Gesichtsschutzschild

Modelltyp: EnbiGuard

Name und Anschrift des Herstellers:


Enbi Germany GmbH
Stauffenbergstr. 3
51379 Leverkusen



DIN CERTCO Nr: C6536ENBI/R0

Der EnbiGuard Gesichtsschutz reduziert die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion und erfüllt grundlegende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der PSA Verordnung, welche in Abschnitt 1 aufgelistet sind.

- Beschädigten Gesichtsschutz nicht verwenden, er kann die Sicht und den Schutz beeinflussen. Bei Beschädigung austauschen. Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen. Der Gesichtsschutz ist nur zur Anwendung bei Raumtemperatur. Gesichtsschutz ist nicht feuerresistent.

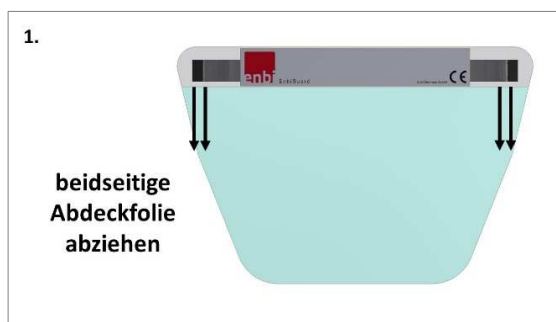

1. Entfernen Sie die Abdeckfolie auf Vorder- und Rückseite.

2. Passen Sie den Gesichtsschutz über das verstellbare Elastikband individuell an Ihre Kopfgröße an.

Die Polsterung im Stirnbereich ist hautverträglich und weist keine Zytotoxizität auf. Das Elastikband entspricht dem OEKO-TEX Standard 100. Werkstoffe, die in Kontakt mit der Haut kommen, können jedoch bei empfindlichen Personen eine allergische Reaktion hervorrufen.

- Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben, wie Sonnenlicht und Strahlung beim Schweißen (UV- und IR-Strahlung). Der Gesichtsschutz stellt keinen Ersatz für einen Mundschutz. Kein Schutz vor mechanischen Einwirkungen und vor Strahlungen dar. EnbiGuard kann in Kombination mit Brillen, Gesichtsschutzmasken und anderer Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) getragen werden.
- EnbiGuard ist ein Einwegprodukt, das nach Gebrauch zu entsorgen ist. Eine Mehrfachverwendung liegt im Ermessen des Anwenders. Die Verwendungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren, wie Gebrauch, Reinigung und Lagerung, ab. Der Gesichtsschutzschirm ist vollständig desinfizierbar. Wir empfehlen eine Benutzung des Gesichtsschutzes für einen Zeitraum von maximal einem Tag.
- Die Lagerung hat bei bei 18 - 22 °C und 30 -70 % relative Luftfeuchtigkeit, geschützt vor direktem Sonnenlicht und in Originalverpackung zu erfolgen. Direktes Sonnenlicht bewirkt eine Verfärbung der Polsterung, die jedoch keinen Einfluss auf die Anwendung des Gesichtsschutzes hat. Die Lagerfähigkeit beträgt drei Jahr nach Auslieferung. Bitte nach Ablauf der Lagerfähigkeit nicht verwenden.
- Zubehör: Kein Zubehör
- Kennzeichnung: ENBI CE (ENBI = Herstellerkürzel, CE = EU-Konformität)

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Homepage: <https://www.enbifaceshield.de/downloads/>

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein medizinisches, zertifiziertes Produkt handelt. Dieser Artikel ist ein Hygiene-/Schutzartikel, der vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen ist.